

GRANUSKIN®

Face & body

HYDROŻEL

GRANUSKIN® face & body to hydrożel do oczyszczania, przemywania i nawilżania ran. Jest przeznaczony do stosowania w przypadku: drobnych otarć skóry, niewielkich skaleczeń, podrażnień, rozcięć, oparzeń. Można stosować również na nieuszkodzoną skórę. Zapobiega powstawaniu biofilmu.

1. Opis, skład i stosowanie

GRANUSKIN® face & body hydrożel do oczyszczania ran posiada łatwą w stosowaniu płynną formułę w sprayu w formie hydrożelu. Jest elektrolizowanym roztworem wody utleniającej oraz kwasu podchloraowego. Produkt został przetestowany dermatologicznie.

- W przypadku bolesnych podrażnień skóry
- Oczyszczanie ran oraz zapobieganie infekcjom
- Do stosowania w przypadku drobnych otarć skóry, skaleczeń, rozcięć, poparzeń. Można stosować również na nieuszkodzoną skórę.
- Przemywanie i nawilżanie ran
- Do stosowania na podrażnioną i zainfekowaną skórę
- Może być stosowany do nawilżenia opatrunku rany jak i samej rany, a także do rozmiękczenia zaschniętego opatrunku
- Wyplukuje substancje drażniące odpowiadające za nieprzyjemny zapach z rany
- Zapobiega powstawaniu biofilmu

Mechanizm działania

Hydrożel do oczyszczania ran **GRANUSKIN® face & body** to elektrochemicznie zmodyfikowany roztwór wody, stabilizowany kwasem podchloraowym. Służy przede wszystkim zmianie środowiska rany: mechanicznie usuwa ciała obce, które mogą powodować podrażnienia i infekcje skóry oraz zapewnia optymalne nawilżenie, wilgotność, dotlenienie oraz pH, wspierając w ten sposób proces gojenia.

Nie zawiera alkoholu

Nie wymaga splukiwania

Skład:

Każda butelka wyrobu **GRANUSKIN® face & body** zawiera:

- 0,016% kwasu podchloraowego
- Substancje pomocnicze: woda jonizowana, chlorek sodu, fosforan monosodowy i fluoroorkrzemian sodowo-magnezowy.

2. Opakowanie

Wyrób medyczny dostępny w następujących opakowaniach:

butelki: 60ml, 150ml z pompką dozującą.

3. Dawkowanie i sposób użycia

Nanieść **GRANUSKIN® face & body** hydrożel na dotknięty obszar, aby przemyć ranę i usunąć z niej zanieczyszczenia. Stosować według potrzeb, aby zapewnić optymalne warunki gojenia.

Dla optymalnego efektu, po nałożeniu należy poczekać aż naturalnie wyschnie.

4. Działania niepożądane

W rzadkich przypadkach może wystąpić niewielkie mrowienie.

5. Interakcje

Brak znanych interakcji.

6. Warunki przechowywania

Wyrób medyczny GRANUSKIN® face & body hydrożel należy przechowywać w temperaturze pokojowej do maksymalnie 25°C, z dala od bezpośredniego źródła ciepła i światła słonecznego. Nie przechowywać w temperaturze poniżej 4°C. Nie przenosić do innego opakowania. Zamykać po każdym użyciu. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

7. Ostrzeżenia i środki ostrożności

Wyrobu **GRANUSKIN® face & body** hydrożel nie należy stosować w przypadku rozpoznanej reakcji alergicznej lub nietolerancji na którykolwiek z jego składników. W przypadku wątpliwości, można stosować w innych ranach, po konsultacji z lekarzem.

Nie należy polykać.

Wyłącznie do stosowania miejscowego.

Przeznaczony do ciągłego stosowania do 30 dni bez konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.

Produkt może być stosowany równocześnie z innymi lekami wyłącznie po konsultacji lekarskiej. Może być stosowany u noworodków.

8. Data ważności

Nie stosować po upływie daty ważności podanej na opakowaniu.

Data ważności dotyczy hydrożelu **GRANUSKIN® face & body** znajdującego się w oryginalnym, nie-naruszonym przy przechowywaniu opakowaniu.

9. Utylizacja

Po upływie daty ważności wyrób należy zutylizować zgodnie z zasadami gospodarki odpadami.

Nie należy wyrzucać hydrożelu **GRANUSKIN® face & body** ani jego opakowania do środowiska naturalnego.

Producent:

CF Pharma Ireland Ltd.
Unit 73B, Hebron Industrial Estate
Kilkenny, Irlandia

Dystrybutor:

Hexanova Sp. z o.o.
Bukowa 36
05-092 Łomianki
www.hexanova.pl

PK2525-00

Ostatnia aktualizacja ulotki: listopad 2024

Wyrób medyczny  0426  25°C
4°C